

# Solofix® Safety S


Sicherheits-Stahllanzette für die Kapillarblutentnahme.  
Schreiben Sie Sicherheit groß!



Erfüllen Sie die Anforderungen der  
**TRBA 250**

# Solofix® Safety S


## Einfach sicher!

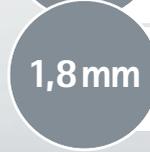


Klingenstärke	1 mm
Punktionstiefe	1,8 mm
Blutprobe	10 - 40 µl
	mittlerer Blutfluss
	allgemeine Blutdiagnose
VE (Stück/Pack)	200
Artikelnummer	6183060




1 Öffnen Sie die Peel-packung und entnehmen Sie die Lanzette.

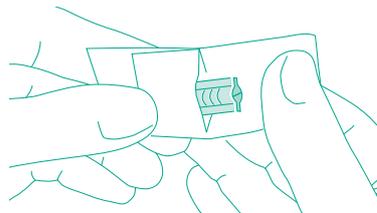

2 Um den automatischen Punktionsmechanismus zu aktivieren, drücken Sie die Lanzette gegen die ausgewählte Punktionsstelle.

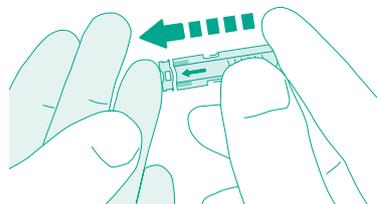

3 Entnehmen Sie die Blutprobe um die gewünschten Untersuchungen durchzuführen.

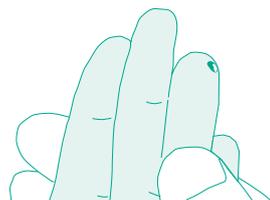

### Schutz vor Nadelstichverletzungen

Der automatische, irreversible Klingenrückzug sorgt für effizienten Schutz bei der Kapillarblutentnahme.

### Einfache Handhabung

Solofix® Safety S ermöglicht eine präzise Hautpunktion durch Ein-Schritt-Aktivierung. Der zum Auslösen benötigte Druck ist auf die Anforderungen für Finger, Ohrläppchen und Ferse abgestimmt.

### Hoher Patientenkomfort

Das Schmerzempfinden wird durch die Punktion mit der rostfreien Edelstahlklinge minimiert, die durch einen hochpräzisen Federmechanismus schnell ausgestoßen und zurückgezogen wird.