

AESCULAP Aicon® – Label All-In-ONE¹


WIEDERABLÖSBARES ETIKETT



1 VOR DER STERILISATION

Aufkleben


Welches Schutzpapier wird für welche Verpackungsart entfernt?



Für eloxierte Aluminium-Oberflächen und siegelfähige Klarsichtbeutel (für die Kunststoff-Verbundfolie), Entfernung des Schutzpapiers 

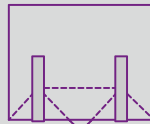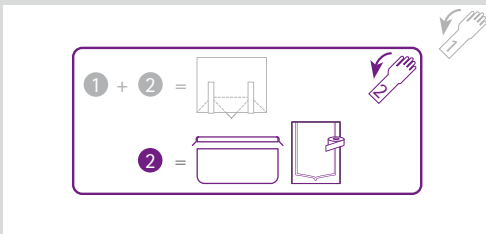

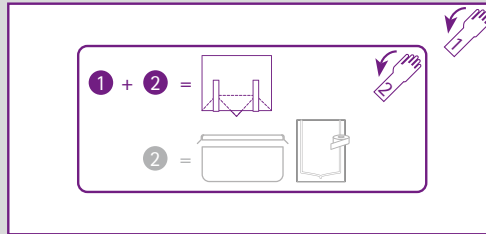


Für Sterilisationsvlies, vollständige Entfernung des Schutzpapiers  + 




2 NACH DER STERILISATION

Entfernen des Labels von der Sterilverpackung für die permanente Dokumentation in der Patientenakte

3 DOKUMENTATION

Einkleben in die Patientenakte, GÄNZLICHE ENTFERNUNG von Schutzpapier  +  und Zwischenfolie 

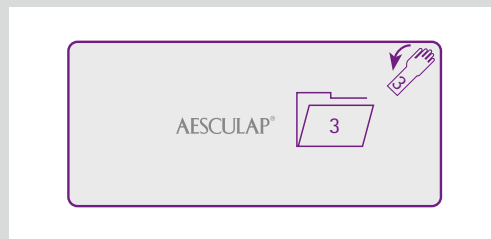

Mit Prozessindikator für die Dampfsterilisation

Beschreibung des Farbumschlags

Vor der Sterilisation

Nach der Sterilisation

Blau

Braun

- Prozessindikator gemäß ISO 11140-1 Typ 1

Spezifikationen

- Label Größe 75 x 35 mm
- CE – Kennzeichnung
- Aesculap Thermotransferbänder:

IC-V008

geeignet für den Industriedrucker

IC-V014

geeignet für den Tischdrucker

Farbe außenliegend – in Schwarz²

AESCULAP® Label All In ONE

Flexible Verwendung für unterschiedliche Oberflächen:

- eloxiertes Aluminium
- siegelfähige Klarsichtbeutel (für Kunststoff-Verbundfolie)
- Sterilisationsvlies
- Papier für die Dokumentation in der Patientenakte

D-ST19021 0720/PDF/2

¹Nur für Dampfsterilisationsprozesse | ²Es können Produktinformationen über Ihren Aesculap Ansprechpartner erfragt werden

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-26 00 | www.aesculap.com