



## 1 KONNEKTION DES INFUSIONS- / TRANSFUSIONSBESTECKS

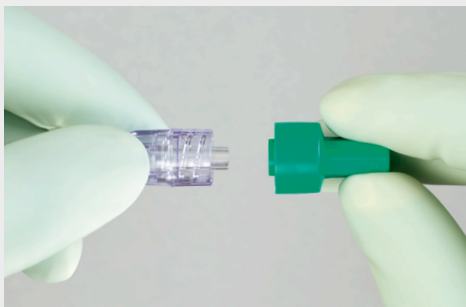

Der PrimeStop Konnektor gewährleistet, dass das Entlüften der Leitung automatisch stoppt und die Umgebung nicht mit Blut kontaminiert wird.

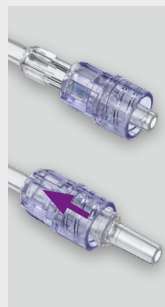

Bewegen Sie die rotierbare Überwurf-Lockmutter zurück bis zum Anschlag. Der Luerkonus wird sichtbar und ermöglicht eine einfachere Konnektierung.




Konnektieren Sie das Infusionsbesteck, bewegen Sie die Überwurf-Lockmutter nach vorn und schrauben Sie diese auf das entsprechende Gegenstück.

## 2 DISKONNEKTION DES INFUSIONS- / TRANSFUSIONSBESTECKS



Lösen Sie die Überwurf-Lockmutter, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

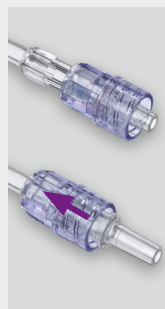

Bewegen Sie die rotierbare Überwurf-Lockmutter bis zum Anschlag zurück.



Drehen Sie die Überwurf-Lockmutter mit dem Ansatz gegen den Uhrzeigersinn und lösen Sie so das Infusions- / Transfusionsbesteck.

# Der neue Spin-Lock® Konnektor

Anwendungsempfehlung