

# Softa® Cloth CHX 2%

Zur Desinfektion von Medical Devices  
im Rahmen der Infusionstherapie



# Softa® Cloth CHX 2%

## Tuch für die Desinfektion von Konnektionsstellen bei intravenösen Zugängen


### Wussten Sie schon?

#### Gefäßkatheter-assoziierte Infektionen (CRBSI)


Infektionen, die von zentralvenösen Gefäßkathetern ausgehen (CRBSI), zählen zu den häufigsten Ursachen nosokomialer Infektionen (HAI).<sup>1</sup> Mit CRBSI ist das Vorhandensein einer Bakteriämie definiert, die im Zusammenhang mit einem intravenösen Katheter auftritt. Sie ist eine der häufigsten, letalen und kostenintensiven Komplikationen im Rahmen der zentralvenösen Katheterisierung.

#### Anwendungshinweise


Softa® Cloth CHX 2% sind Einweg-Alkoholtücher mit 2% Chlorhexidin für die Reinigung und Desinfektion von Medical Devices – insbesondere Konnektionen im Rahmen intravenöser Interventionen. Für sichere und unkomplizierte Zugänge in der Infusionstherapie sind die Tücher mit Discifix® C, Caresite® und Safeflow kompatibel.

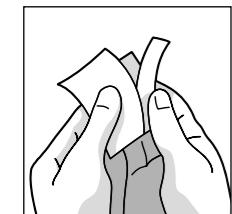


Tragen Sie Handschuhe und entnehmen Sie das Tuch aus dem Sacht.

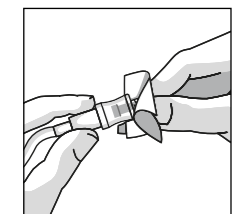

Wischen Sie den visuell reinen Zugang für mindestens 5 Sekunden mit einer Drehbewegung des Tuchs (Sichtbare Verschmutzungen müssen zuerst mit einem separaten Tuch entfernt werden).

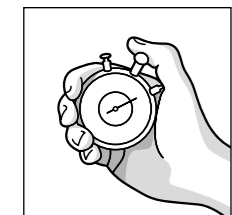

Trocknen lassen.  
Nicht trocken wischen.

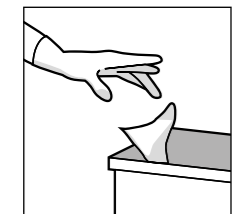

Benutzte Tücher entsorgen.

### Einwirkzeit

Mikroorganismen (Anwendung unter reinen Bedingungen bei Raumtemperatur – mind. 20°C)	Prüfnormen	Wirksamkeit
E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa	EN 13727	15 Sekunden (geringe und hohe Belastung)
	EN 16615*	1 Minute
C. albicans	EN 13624	15 Sekunden (geringe und hohe Belastung)
	EN 16615*	1 Minute

\*Test mit kürzerer Einwirkzeit ist technisch nicht durchführbar

### Zusammensetzung

70% v/v Isopropylalkohol, 2% w/v Chlorhexidingluconat

### Physikalisch-chemische Daten

Tuchmaterial: 25 g/m<sup>2</sup>  
(hydrophile, nichtionische Oberfläche)  
Tuchgröße: ausgefaltet: 162 x 150 mm  
gefaltet: 42 x 32 mm  
Aussehen: sauberes, einheitlich weißes Tuch, vorbefeuchtet, fremdstofffrei

### Siehe Sicherheitsdatenblatt (MSDS)


Lesen Sie vor der Anwendung grundsätzlich das Etikett und die Produktinformation. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nur zur professionellen Verwendung. Aus der Reichweite von Kindern fernhalten.

### Zertifizierung

Softa® Cloth CHX 2% ist gemäß den Anforderungen der Verordnung über Medizinprodukte (Medical Device Regulation) 2017/745 eingetragen und besitzt die CE-Kennzeichnung.

### Fünf Ursachen für gefäßkatheterbezogene Gefäßkatheter assoziierte Infektionen (CRBSI)<sup>1</sup>

Bei einer von fünf Ursachen für gefäßkatheterbezogene Infektionen kann Softa® Cloth CHX 2% Sie aktiv unterstützen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Vor und nach jeder Manipulation muss die Zugangsstelle gereinigt und desinfiziert werden. Nur mit einer sauberen und desinfizierten Zugangsstelle können nosokomiale Infektionen vermieden werden.

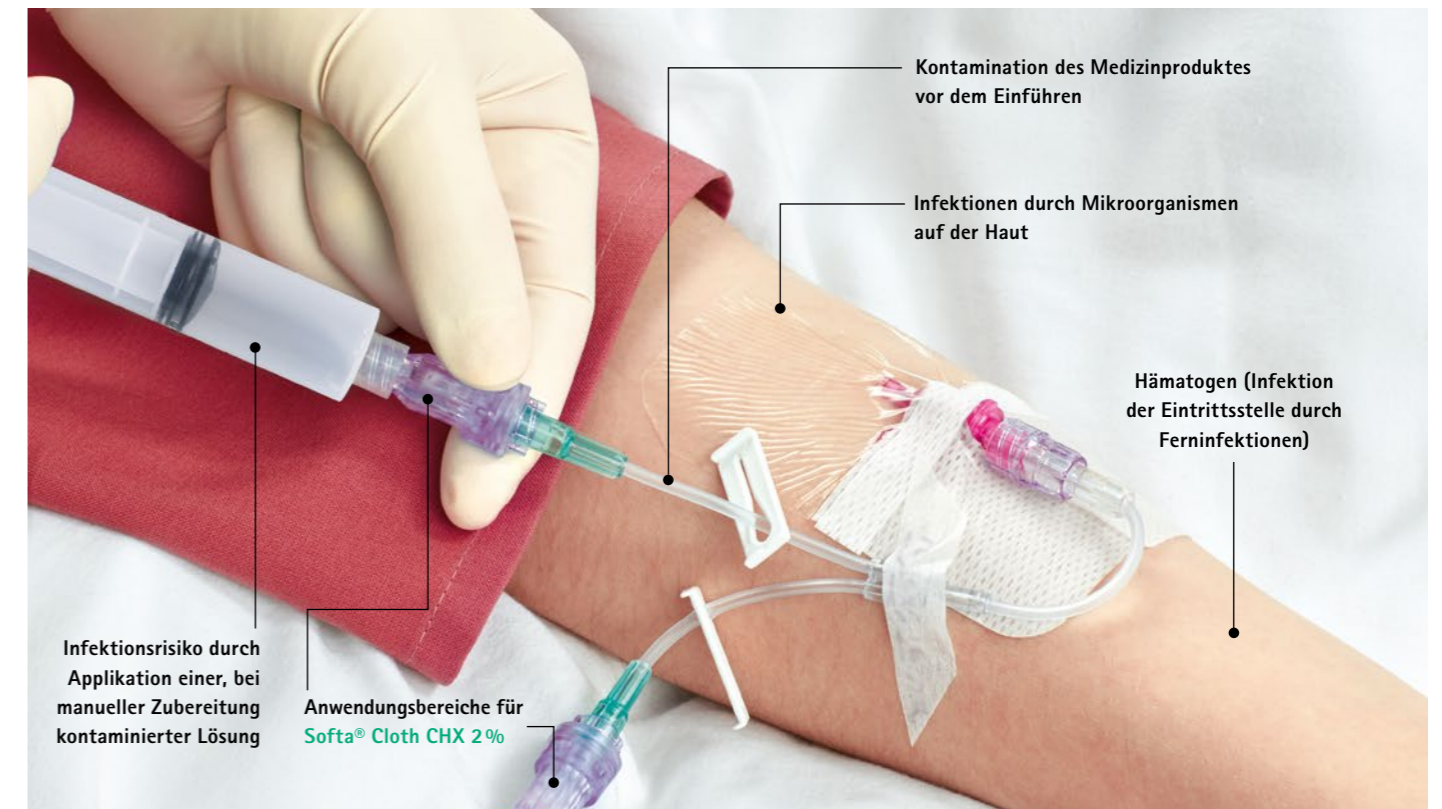

### Handelsverpackung/Haltbarkeit

Produkt	Haltbarkeit	VE	Art.-Nr.
Softa® Cloth CHX 2%	24 Monate	100 Tücher	19581

VE= Verkaufseinheit

<sup>1</sup> Catheter-related bloodstream infections - Published 4. April 2014 - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093967>.

