



Kontinenzversorgung


KURZANLEITUNG

URINALKONDOMVERSORGUNG


KURZANLEITUNG URINALKONDOMVERSORGUNG

DIE SICHERE HANDHABUNG VON KONDOMURINALEN

Nutzen Sie die Möglichkeit, aktiv am Leben teilzunehmen. Mit unserer Kondomurinalversorgung wahren Sie Ihre Intimsphäre durch eine einfache und diskrete Selbstversorgung. Durch die verschiedenen Größen (25 mm – 41 mm) sowie die unterschiedlichen Längen (Standard & Short) ist ein angenehmer Tragekomfort gewährleistet. Um die passende Größe zu finden, nutzen Sie bitte unser Maßband (Art.-Nr.: 4005120), mit Hilfe dessen Sie sowohl Durchmesser als auch Länge des Penis bestimmen können.

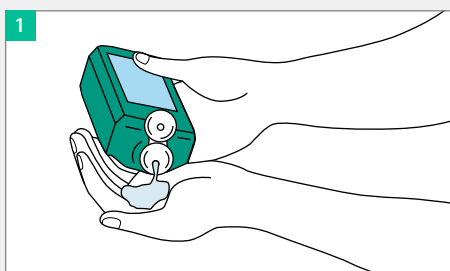


Hände gründlich mit Seife waschen

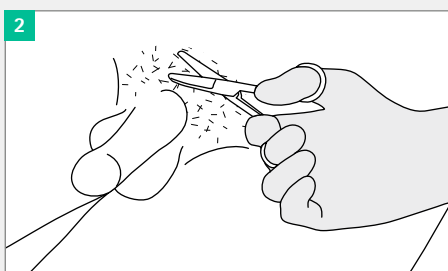


Schambehaarung kürzen




- Intimwäsche
- Um eine gute Haftung des Kondomurinals zu erreichen, muss die Haut trocken und fettfrei sein

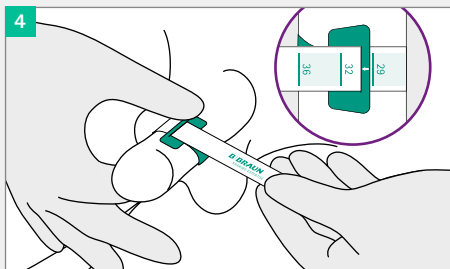

Messen des Penisumfangs und der Länge mit der Maßschablone und Auswahl des richtigen Durchmessers von Urimed® Vision.

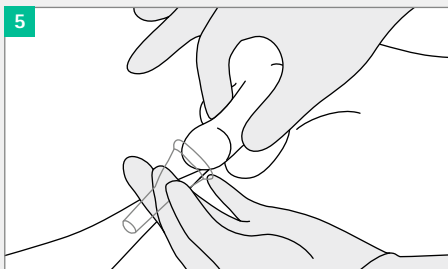


Vorhaut nach vorne schieben und Kondomurinal ansetzen. Bei retrahiertem (verkürztem) Penis die Variante Urimed® Vision Short einsetzen.

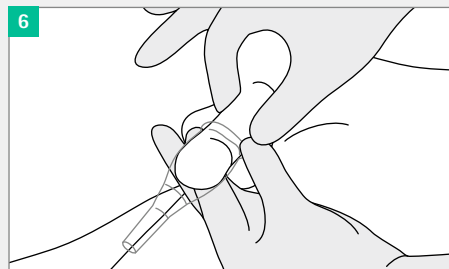

Kondomurinal mit einer Hand festhalten, während die andere das Kondomurinal abrollt

ACHTUNG!

Penisspitze darf nicht in den Trichter hineinreichen (Gefahr von Druckstellen)

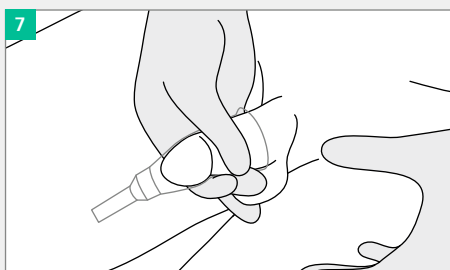


Kondomurinal andrücken

ACHTUNG!


Darauf achten, dass sich keine Haare auf der Klebefläche befinden, die Klebefläche gleichmäßig haftet und keine Falten vorhanden sind, sonst besteht die Gefahr von Undichtigkeiten

Allgemeine Hinweise

- Kondomurinale sollten im Rahmen der Körperhygiene täglich gewechselt werden, da sonst evtl. Hauterkrankungen (z.B. Pilzbefall) auftreten können.
- Durch zirkuläre Beinbeutelbefestigungen kann die Blutversorgung des Beins beeinträchtigt werden.
- Fixierpflaster (Urimed® Klett) kann zusätzlich lagefixierend und zugentlastend angebracht werden.
- Kontraindikationen:
 - › Periphere Durchblutungsstörungen
 - › Diabetisches Fußsyndrom
 - › Ulcus Cruris

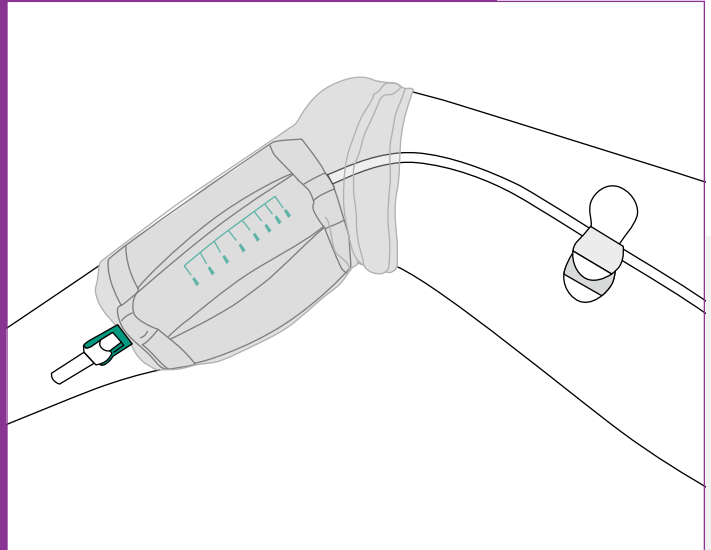


Zur Fixierung des Beinbeutels gibt es die folgenden Alternativen (A/B)

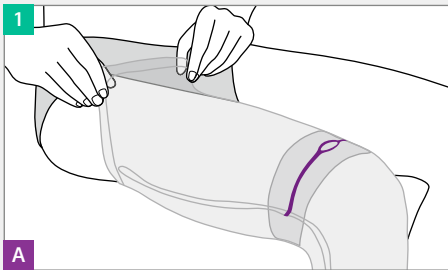


A

Ober- oder Unterschenkel Beinbeutelbefestigung Urimed® Fix spezial:
Elastische Manschette mit dem farbigen Ende oben über das Bein streifen

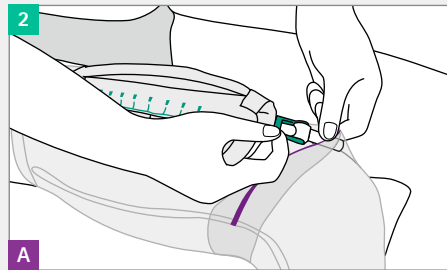


A

Ablassventil des Beinbeutels durch die violett markierte Ventilöffnung von Urimed® Fix spezial stecken

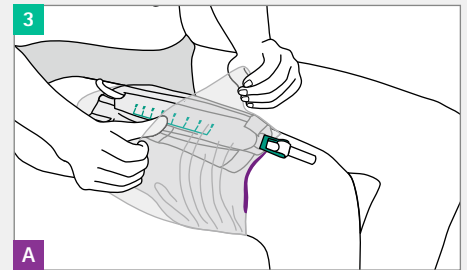


A

Unteres Ende der Manschette über den Beinbeutel stülpen

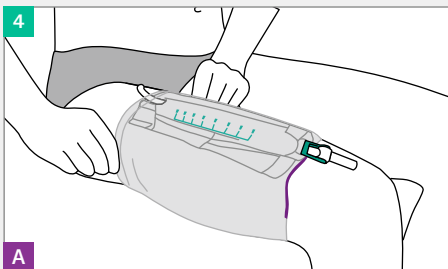

A

Ausrichten und – fertig

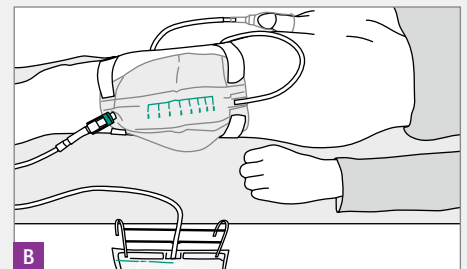

B

Beinbeutel Ober- oder Unterschenkelbefestigung mit Urimed® Strap:
Anschluss eines Medicare® Bettbeutels oder eines Urimed® B'Bags für die Nachtversorgung möglich

VORSICHT: Zirkulärer Druck – z.B. Gefahr durch Einschnürung der Blutgefäße

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen