

AESCULAP Aicon®

Ein Sprung nach vorn in
der Sterilgutversorgung




Perforationsfeldabdeckung

Wird aufgeklickt und kann während der Reinigung und Sterilisation dort verbleiben (optional).

Indikatorumschlag (Einwegfilter)

Von außen sichtbar.

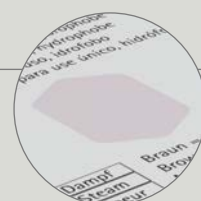

Containerplombe

Verbleibt in der Position trotz Öffnen des Containers und Brechen der Plombe; Seitlich und von oben erkennbar.

QR-Code

Liefert weitere Produktinformationen, z. B. kurze erklärende Videoclips, indem der Code einfach mit einer Kamera des Mobilgeräts gescannt wird.

Frontplatte

Zur Kennzeichnung; rastet an der Unterseite ein. Erhältlich in 10 Farben; Adapter für Etiketten und Indikatorschilder verfügbar.

Kennzeichnungsschilder

Erhältlich in 10 Farben und 2 Größen – kann beschriftet und/oder zur Farbcodierung verwendet werden. Kann auf die Frontplatte und/oder den Siebkorb angebracht werden.

Halteklammern

Zur Befestigung von Stücklisten, Etiketten, Laufzetteln, etc.

Steriles Wannenrand-Design

Reduzierte Geräusche durch Griffmulden und verändertes Wannenrand-Design.

Ergonomisches Verschlusssystem*

Einmal-Papierfilter


Filterhalter

Containeroberfläche

Ohne Schrauben und Nieten.

EDS (Enhanced Drying System)

Aktives Trocknungssystem für reduzierte Trocknungszeiten (optional) – zwei EDS-Module pro Containerwanne. Optische Überprüfung durch deutlich sichtbaren «blauen Punkt»

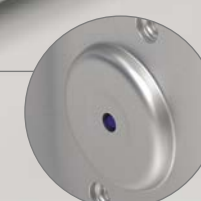


AESCULAP Aicon®

Siebkorb System

Wellenboden

Rutschfester, wellenförmiger Siebkorb-Boden. Die Ringinstrumente bleiben aufrecht während des Packprozesses, für eine komfortablere Handhabung.

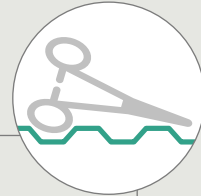

Optional mit Deckel erhältlich

Ergonomische Griffe*

Weiche Konturen

Glattes und abgerundetes Design



Aufeinander abgestimmt

Ermöglicht die Standardisierung des Zyklus durch ein synchronisiertes System.



Stapelung

Stabiles und platzsparendes Stapeln von Siebkörben, mit und ohne Deckel.



Containerwannen ¹		Containerwannen ¹ mit je zwei EDS ² (EDS ² = Aktives Trocknungssystem)	
Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
JJ110		JJ111	
JJ120		JJ121	
JJ130		JJ131	
JJ140		JJ141	

Deckel¹ für Containerwannen mit und ohne EDS², inkl. Filterhalter JJ600

Artikel-Nr.	
JJ410	

Ersatz-EDS-Modul
(EDS² = Aktives Trocknungssystem)

Artikel-Nr.	
JJ800	

Mögliche Siebkorb-Kombinationen	
Artikel-Nr. Containerwanne	Artikel-Nr. Siebkörbe Größe 1/1 oder DIN
JJ110 / JJ111	JJ162R / JJ462R
JJ120 / JJ121	JJ164R / JJ464R JJ161R / JJ461R JJ163R / JJ463R JJ162R / JJ462R JJ162R / JJ462R JJ161R / JJ461R JJ161R / JJ461R JJ161R / JJ461R
JJ130 / JJ131	JJ162R / JJ462R JJ164R / JJ464R JJ163R / JJ463R JJ163R / JJ463R
JJ140 / JJ141	JJ164R / JJ464R JJ164R / JJ464R

Containerwanne Siebkorb Vorderansicht

Siebkörbe¹
Größe 1/1

Artikel-Nr.	
JJ161R	1/1 AESCULAP Aicon® Siebkorb
JJ162R	
JJ163R	
JJ164R	
JJ167R	1/1 AESCULAP Aicon® Siebkorbdeckel

Siebkörbe¹
Größe DIN

Artikel-Nr.	
JJ461R	DIN AESCULAP Aicon® Siebkorb
JJ462R	
JJ463R	
JJ464R	
JJ467R	DIN AESCULAP Aicon® Siebkorbdeckel

Containerwannen ¹		Containerwannen ¹ mit je zwei EDS ² (EDS ² = Aktives Trocknungssystem)	
Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
JJ210		JJ211	
JJ220		JJ221	
JJ230		JJ231	
JJ240		JJ241	



Deckel¹ für Containerwannen mit und ohne EDS², inkl. Filterhalter JJ600

Artikel-Nr.	
JJ420	

EDS² Ersatz Modul (EDS² = Aktives Trocknungssystem)

Artikel-Nr.	
JJ800	

¹ Maßtabelle siehe Seite 14-15
²EDS = Enhanced Drying System

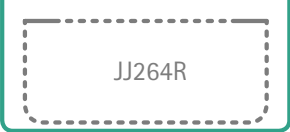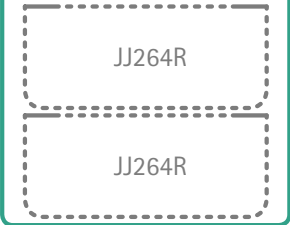Mögliche Siebkorb-Kombinationen	
Artikel-Nr. Containerwannen	Art. Nr. Siebkörbe Größe 1/2
JJ210 / JJ211	
JJ220 / JJ221	   
JJ230 / JJ231	 
JJ240 / JJ241	

— Containerwanne - - - Siebkorb Vorderansicht

Siebkörbe¹ Größe 1/2

Artikel-Nr.	
JJ261R	1/2 AESCULAP Aicon® Siebkorb
JJ262R	
JJ263R	
JJ264R	
JJ267R	1/2 AESCULAP Aicon® Siebkorbdeckel

Hinweis: Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 5 kg nicht überschreiten, um eine übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden. AESCULAP Aicon® Siebkörbe werden aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 und medizinischem Silikon USP Class VI (Verschluss am Deckel) gefertigt.
¹ Maßtabellen siehe Seite 16-17

AESCULAP Aicon®

Sterilcontainer System Größe 3/4




Containerwannen ¹		Containerwannen ¹ mit je zwei EDS ² (EDS ² = Aktives Trocknungssystem)	
Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
JJ310		JJ311	
JJ320		JJ321	
JJ330		JJ331	
JJ340		JJ341	

Deckel ¹ für Containerwannen mit und ohne EDS ² , inkl. Filterhalter JJ600	
Artikel-Nr.	
JJ430	

EDS ² Ersatz Modul (EDS ² = Aktives Trocknungssystem)	
Artikel-Nr.	
JJ800	

AESCULAP Aicon®

Siebkörbe Größe 3/4

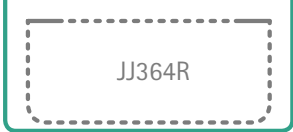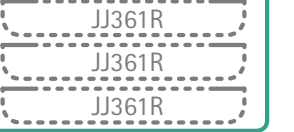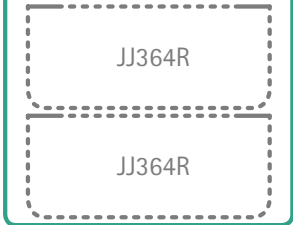
Mögliche Siebkorb-Kombinationen	
Artikel-Nr. Containerwannen	Art.Nr. Siebkörbe Größe 3/4
JJ310 / JJ311	
JJ320 / JJ321	   
JJ330 / JJ331	 
JJ340 / JJ341	

Containerwanne Siebkorb Vorderansicht

Siebkörbe ¹ Größe 3/4	
Artikel-Nr.	
JJ361R	3/4 AESCULAP Aicon® Siebkorb
JJ362R	
JJ363R	
JJ364R	
JJ367R	3/4 AESCULAP Aicon® Siebkorbdeckel

Zubehör


Frontplatte
inkl. zwei JJ599 Halteklammern

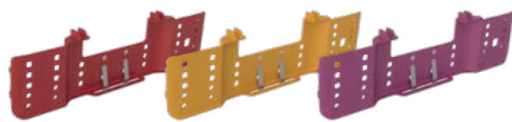

Farben können von der Abbildung abweichen

Artikel-Nr. 1 Stk.	Artikel-Nr. 10 Stk.	Farben	Artikel-Nr. 1 Stk.	Artikel-Nr. 10 Stk.	Farben
JJ500	JJ520	Rot	JJ505	JJ525	Schwarz
JJ501	JJ521	Blau	JJ506	JJ526	Weiß
JJ502	JJ522	Grün	JJ507	JJ527	Orange
JJ503	JJ523	Gelb	JJ508	JJ528	Violett
JJ504	JJ524	Grau	JJ509	JJ529	Braun

Schilder
56 x 29 mm

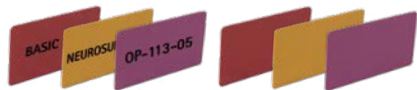


Farben können von der Abbildung abweichen

mit Beschriftung ³ Artikel-Nr.	ohne Beschriftung Artikel-Nr.	Farben
JJ540B	JJ540U	Rot
JJ541B	JJ541U	Blau
JJ542B	JJ542U	Grün
JJ543B	JJ543U	Gelb
JJ544B	JJ544U	Grau
-	JJ545U	Schwarz
JJ546B	JJ546U	Weiß
JJ546B-BC ⁵		Weiß
JJ546B-IC ⁶		Weiß
JJ547B	JJ547U	Orange
JJ548B	JJ548U	Violett
JJ549B	JJ549U	Braun

3| mit Beschriftung – ein, zwei oder drei Zeilen, 5 mm Schriftgröße, bis zu 13 Zeichen pro Zeile
5| 1. Zeile Barcode (Typ 128A), 2. Zeile identischer Inhalt des Barcodes wie Klarschrift, 3. Zeile beliebige Klarschrift; alle bis zu 13 Zeichen pro Zeile
6| 1. Zeile Instacount Barcode bis zu 10 Zeichen, 2. Zeile beliebig Klarschrift bis zu 20 Zeichen, 3. Zeile beliebige Klarschrift bis zu 13 Zeichen

Schilder
56 x 19 mm

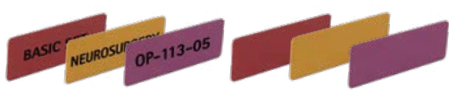

Farben können von der Abbildung abweichen

mit Beschriftung ⁴ Artikel-Nr.	ohne Beschriftung Artikel-Nr.	Farben
JJ560B	JJ560U	Rot
JJ561B	JJ561U	Blau
JJ562B	JJ562U	Grün
JJ563B	JJ563U	Gelb
JJ564B	JJ564U	Grau
-	JJ565U	Schwarz
JJ566B	JJ566U	Weiß
JJ566B-BC ⁷		Weiß
JJ566B-IC ⁸		Weiß
JJ567B	JJ567U	Orange
JJ568B	JJ568U	Violett
JJ569B	JJ569U	Braun

4| mit Beschriftung – ein- oder zweizeilig, 5 mm Schriftgröße, bis zu 13 Zeichen pro Zeile
7| 1. Zeile Barcode (Typ 128A), 2. Zeile identischer Inhalt des Barcodes als Klarschrift, alle bis zu 13 Zeichen pro Zeile
8| 1. Zeile Instacount Barcode bis zu 10 Zeichen, 2. Zeile beliebige Klarschrift bis zu 20 Zeichen

Zubehör

Filterhalter

Artikel-Nr.	
JJ600	

Perforationsfeldabdeckung

Artikel-Nr. 1 Stk.	Artikel-Nr. 10 Stk.	
JJ440	JJ441	

Einweg Papierfilter

Artikel-Nr. 100 Stk.	Ohne Indikator
JJ612	
Artikel-Nr. 100 Stk.	Mit Indikator (Dampf) ²
JJ613	

Containerplomben

Artikel-Nr. 100 Stk.	Art. Nr. 1000 Stk.	Ohne Indikator
JJ705	JJ700	
Artikel-Nr. 100 Stk.	Art. Nr. 1000 Stk.	Mit Indikator (Dampf) ²
JJ715	JJ710	

Wiederverwendbarer Filter/Dauerfilter

Artikel-Nr. 10 Stk.	
JJ615	

Geeignet für 1.000 Aufbereitungszyklen

Adapter für Indikatorschilder (ca. 80 x 35 mm)

Artikel-Nr.	
JJ582	

Ersatzhalteklammer für Frontplatte

Artikel-Nr. 10 Stk.	
JJ599	

Maßtabellen für Sterilcontainer Systeme

Maßtabelle für Sterilcontainer Systeme der Größe 1/1 mit und ohne EDS²

Artikel-Nr.	Containerdeckel - Außenmaße (L x B x H mm)	Containerwanne - Außenmaße (L x B x H mm)	Containerwanne - Innenmaße [L x B x H mm] (Ladehöhe)	Sterilcontainer mit Deckel - Außenmaße (L x B x H mm)
Containerdeckel				
JJ410	598 x 297 x 28			
Containerwanne				
JJ110 / JJ111*		598 x 297 x 86	548 x 258 x 64	598 x 297 x 100
JJ120 / JJ121*		598 x 297 x 136	548 x 258 x 114	598 x 297 x 150
JJ130 / JJ131*		598 x 297 x 186	548 x 258 x 164	598 x 297 x 200
JJ140 / JJ141*		598 x 297 x 236	548 x 258 x 214	598 x 297 x 250

Maßtabelle für Sterilcontainer Systeme der Größe 1/2 mit und ohne EDS²

Artikel-Nr.	Containerdeckel - Außenmaße (L x B x H mm)	Containerwanne - Außenmaße (L x B x H mm)	Containerwanne - Innenmaße [L x B x H mm] (Ladehöhe)	Sterilcontainer mit Deckel - Außenmaße (L x B x H mm)
Containerdeckel				
JJ420	300 x 297 x 28			
Containerwanne				
JJ210 / JJ211*		300 x 297 x 86	250 x 258 x 64	300 x 297 x 100
JJ220 / JJ221*		300 x 297 x 136	250 x 258 x 114	300 x 297 x 150
JJ230 / JJ231*		300 x 297 x 186	250 x 258 x 164	300 x 297 x 200
JJ240 / JJ241*		300 x 297 x 236	250 x 258 x 214	300 x 297 x 250

² EDS = Aktives Trocknungssystem
* Containerwanne mit EDS (Enhanced Drying System)

Maßtabelle für Sterilcontainer Systeme der Größe 3/4 mit und ohne EDS²

Artikel-Nr.	Containerdeckel - Außenmaße (L x B x H mm)	Containerwanne - Außenmaße (L x B x H mm)	Containerwanne - Innenmaße [L x B x H mm] (Ladehöhe)	Sterilcontainer mit Deckel - Außenmaße (L x B x H mm)
Containerdeckel				
JJ430	464 x 297 x 28			
Containerwanne				
JJ310 / JJ311*		464 x 297 x 86	414 x 258 x 64	464 x 297 x 100
JJ320 / JJ321*		464 x 297 x 136	414 x 258 x 114	464 x 297 x 150
JJ330 / JJ331*		464 x 297 x 186	414 x 258 x 164	464 x 297 x 200
JJ340 / JJ341*		464 x 297 x 236	414 x 258 x 214	464 x 297 x 250



Weitere Informationen zu Sterilcontainer und Siebkörben finden Sie im Gesamtkatalog 4008230
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den untenstehenden Link ein.
<https://bbraun.info/container>



Notizen:

² EDS = Aktives Trocknungssystem
* Containerwanne mit EDS (Enhanced Drying System)

Maßtabelle für Siebkörbe

Maßtabelle für
Siebkörbe Größe 1/1

Artikel-Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Innenmaße [L x B x H mm]
Siebkorbdeckel			
JJ167R	528 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ161R		537 x 250 x 35	535 x 248 x 32
JJ162R		537 x 250 x 55	535 x 248 x 52
JJ163R		537 x 250 x 80	535 x 248 x 77
JJ164R		537 x 250 x 105	535 x 248 x 102

Maßtabelle für
Siebkörbe Größe 1/2

Artikel-Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Innenmaße [L x B x H mm]
Siebkorbdeckel			
JJ267R	231 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ261R		240 x 250 x 35	238 x 248 x 32
JJ262R		240 x 250 x 55	238 x 248 x 52
JJ263R		240 x 250 x 80	238 x 248 x 77
JJ264R		240 x 250 x 105	238 x 248 x 102

Maßtabelle für
Siebkörbe Größe 3/4

Artikel-Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Innenmaße [L x B x H mm]
Siebkorbdeckel			
JJ367R	394 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ361R		403 x 250 x 35	401 x 248 x 32
JJ362R		403 x 250 x 55	401 x 248 x 52
JJ363R		403 x 250 x 80	401 x 248 x 77
JJ364R		403 x 250 x 105	401 x 248 x 102

Maßtabelle für
Siebkörbe Größe DIN

Artikel-Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Außenmaße (L x B x H mm)	Siebkorb Innenmaße [L x B x H mm]
Siebkorbdeckel			
JJ467R	476 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ461R		485 x 250 x 35	483 x 248 x 32
JJ462R		485 x 250 x 55	483 x 248 x 52
JJ463R		485 x 250 x 80	483 x 248 x 77
JJ464R		485 x 250 x 105	483 x 248 x 102

AESCULAP Aicon® Instrumenten-Organisationssystem

Ein Sicherheitsgurt für Ihre chirurgischen Instrumente

Welches bevorzugen Sie?

So...



...oder doch lieber so?



Entdecken Sie das AESCULAP Aicon® Instrumenten-Organisationssystem, das entwickelt wurde, um chirurgische Instrumente zu schützen und zu organisieren, damit alles fest an seinem Platz bleibt. Erleben Sie die werkzeuglose Montage und das flexible Baukastensystem. Es unterstützt Ihre Instrumente bei der Einsatzbereitschaft im OP, indem es die mechanische Belastung während des Transports reduziert. Investieren Sie in Prävention!

AESCULAP Aicon®

Instrumenten-Organisationssystem


Artikel-Nr.		Zwischen-räume	Dimensionen Länge x Höhe x Breite	PAK	
JJ901R	AESCULAP Aicon® Fixierung Befestigungsklammer klein		19 x 9 x 12 mm	10 Stk.	
JJ902R	AESCULAP Aicon® Fixierung Befestigungsklammer mittel		34 x 9 x 12 mm	10 Stk.	
JJ903R	AESCULAP Aicon® Fixierung Befestigungsklammer groß		96 x 9 x 12 mm	2 Stk.	
JJ906R	AESCULAP Aicon® Werkzeug zur Demontage		123 x 30 x 3 mm	1 Stk.	
JJ910	AESCULAP Aicon® Okularhalter		52 x 33 x 31 mm	1 Stk.	
JJ911	AESCULAP Aicon® Schafthalter		52 x 33 x 8 mm	1 Stk.	
JJ912	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung A	2	27 x 40 x 8 mm	1 Stk.	
JJ913	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung A	4	52 x 40 x 8 mm	1 Stk.	

Hinweis: Das AESCULAP Aicon® Instrumenten-Organisationssystem passt nur in die AESCULAP Aicon® Siebkörbe (JJ-Serie).

Instrumenten-Organisationssystem

Artikel-Nr.		Zwischen- räume	Dimensionen Länge x Höhe x Breite	PAK	
JJ914	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung B	3	27 x 40 x 8 mm	1 Stk.	
JJ915	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung B	7	52 x 40 x 8 mm	1 Stk.	
JJ916	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung C	2	27 x 40 x 8 mm	1 Stk.	
JJ917	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung C	2	52 x 40 x 8 mm	1 Stk.	
JJ918	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung E		27 x 40 x 8 mm, Diam.: 5 mm	1 Stk.	
JJ919	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung E		27 x 40 x 8 mm, Diam.: 7.5 mm	1 Stk.	
JJ920	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung E		27 x 40 x 8 mm, Diam.: 10 mm	1 Stk.	
JJ921	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung E		32 x 40 x 8 mm, Diam.: 15 mm	1 Stk.	

Artikel-Nr.		Zwischen- räume	Dimensionen Länge x Höhe x Breite	PAK	
JJ922	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung E		52 x 40 x 8 mm, ø: 25 mm	1 Stk.	
JJ923	AESCULAP Aicon® Instrumentenlagerung E		52 x 40 x 8 mm, ø: 30 mm	1 Stk.	
JJ924	AESCULAP Aicon® Trennsteg		27 x 40 x 8 mm	1 Stk.	
JJ925	AESCULAP Aicon® Trennsteg		52 x 40 x 8 mm	1 Stk.	

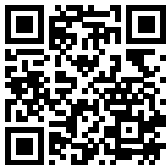


Video-Anleitung zur Montage und Demontage zu AESCULAP Aicon® Instrumenten-Organisationssystem
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den untenstehenden Link ein.
<https://bbraun.info/aesculapaiconios>

AESCULAP® Sterilcontainer System

Der Herausforderung der Nachhaltigkeit
im Gesundheitswesen gerecht werden

Weitere Informationen zu Aesculap Aicon®
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website:
<https://www.bbraun.de/aesculapaicon>

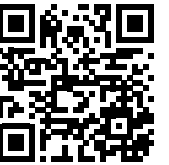

Medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt sucht nach neuen Wegen, um ihre Aktivitäten und die von ihnen erbrachte medizinische Versorgung nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Da die Herausforderung des Klimawandels immer stärker in den Fokus rückt, sind Krankenhäuser bestrebt, ihren Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Umweltleistung im Gesundheitswesen zu leisten.



B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarke „AESCULAP Aicon“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Technische Änderungen vorbehalten.
Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Nr. 4008341 Stand: 09/2025