



HYGIENE

Prontoderm®
zur keimlastreduzierenden
Waschung (auch MRE)

ANWENDUNGSHINWEISE

RISIKOSENKUNG VOR OPERATIVEN EINGRIFFEN

Für eine optimale Vorbereitung Ihrer anstehenden Operation empfehlen wir eine vorbeugende Ganzkörper-Waschung mit **Prontoderm®**. Dies kann das Risiko einer möglichen Wundinfektion reduzieren.

Behandlungsbeginn:

Bis zu 5 Tage unmittelbar vor geplantem Eingriff. Restliche Mengen können nach der OP weiter verwendet werden.

1. Körper- und Haarwäsche:

- Körper inklusive Haare mit gewohntem Duschgel/Schampoo waschen.
- Nach dem Abtrocknen mit frischen Handtüchern **Prontoderm® Foam** auf der gesamten Körperoberfläche gleichmäßig dünn verteilen und antrocknen lassen, ebenfalls in die noch feuchten Haare einmassieren und antrocknen lassen.
- **Körper und Haare nicht abspülen und nicht eincremen! Die Produkte enthalten Pflegestoffe.**



2. Nasenpflege:

- 3 x täglich Nase reinigen. Anschließend mit einem **Watteträger Prontoderm® Nasal Gel** in die Nasenvorhöfe einbringen und Nasenflügel mehrfach zusammendrücken.

3. Mundspülung:

- 3 x täglich nach dem Zähneputzen mit 10 ml **ProntOral®** den Mund spülen (1 Min.).



Einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen. Sie gelangen zu unseren Anwendungsfilmen keimlastfrei.

RISIKOSENKUNG AUF INTENSIVSTATIONEN

Die Versorgung von Patienten auf Intensivstationen erfordert neben den intensiv-medizinischen Maßnahmen die strikte Einhaltung der geltenden Hygiene-Richtlinien.

Unterstützend kann eine keimlastreduzierende Ganzkörper-Waschung des Patienten mit dem Prontoderm®-System durchgeführt werden.



1. Nasenpflege:

- Nase mit einem mit **Prontoderm® Foam** getränkten Watteträger reinigen (bei Bedarf absaugen).
- Anschließend mit neuen Watteträgern **Prontoderm® Nasal Gel** in die Nasenvorhöfe einbringen und Nasenflügel mehrfach zusammendrücken.



2. Mundhygiene:

- Nach dem Zähneputzen mit 10 ml **ProntOral®** den Mund spülen oder mit Watteträger auswischen.



3. Körper- und Haarwäsche (1 x täglich):

- **Prontoderm® Foam** auf einen feuchten Waschlappen geben und die gesamte Körperoberfläche gleichmäßig waschen und anschließend trocknen lassen.
- **Prontoderm® Foam** ebenfalls in die noch feuchten Haare einmassieren und dort antrocknen lassen – **Körper und Haare nicht abspülen!**

nes und einer geeigneten Reader Applikationen einscannen und keimlastreduzierende Waschung.

Prontoderm®

zur keimlastreduzierenden Waschung

Produkt/Inhaltsstoffe	Gebindegröße	Art.-Nr.	PZN
-----------------------	--------------	----------	-----



Prontoderm® zur keimlastreduzierenden Waschung

▪ Prontoderm® Foam	200 ml		
▪ Prontoderm® Nasal Gel	30 ml	400304	11527319
▪ ProntOral®	250 ml		

Einzelprodukte

Prontoderm® Foam

0,11 % Polihexanid, Tenside, Allantoin und Pflegesubstanzen	200 ml Pumpspender	400111	04398270
---	-----------------------	--------	----------

Prontoderm® Nasal Gel

0,1 % Polihexanid, Glycerin, Hydroxyethylcellulose und Pflegesubstanzen	30 ml Tube	400200	04398264
---	---------------	--------	----------

ProntOral®

0,15 % Polihexanid, Aromastoffe, Natrium Cyclamat, Tenside und Pflegesubstanzen	250 ml Flasche mit Dosierkappe	400700	00795270
---	--------------------------------------	--------	----------

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00
 E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
 Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen