



Be 1[®]

SELBSTBESTIMMT DURCHS LEBEN

WIE STEHT ES UM DIE LEBENSQUALITÄT IHRER KOLOSTOMIE-PATIENTEN?

EINE BEEINTRÄCHTIGTE LEBENSQUALITÄT

Ein Kolostoma bedeutet einen großen Einschnitt im Leben eines Patienten. Neben der Diagnose steht der Patient ebenfalls vor neuen Herausforderungen in seinem täglichen Leben.^{1,2}

Fehlende Kontrolle über die Stuhlentleerung, Darmgase und Geräusche werden zu einer zentralen Herausforderung für den Patienten. Die Thematik kann direkte Auswirkungen auf sein soziales Leben und sein Intimleben haben, aber auch Hobbys und andere Aktivitäten können davon betroffen sein.


Wenn das Stoma nicht versteckt werden kann, besteht die Gefahr, dass dies weiterhin zu einer allgemeinen Verschlechterung des Körperbildes und Unwohlsein führt.



50 % der Kolostomie-Träger haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihren Körper (Stuhlentleerung und Darmgasentweichung) innerhalb eines Zeitraumes von 4 Monaten nach der OP verloren haben^{3,4}



1/3 der Kolostomie-Träger vermeiden Freizeitaktivitäten und soziale Kontakte nach der OP⁴

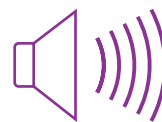

Die am **3.** häufigsten genannte Herausforderung für Kolostomie-Träger ist stomabedingte Geräuscentwicklung, nach Hautproblemen und Geruchsbildung⁵

Be 1[®]: DIE INNOVATION!

Be 1[®] ist ein neues Konzept für die Kolostomie-Versorgung: Eine Kapsel, die Sicherheit und Kontrolle bietet!

Die Be 1[®] Kapsel besteht aus:

- Einem gefalteten, geschlossenen Kolostomie-Beutel mit integriertem Filter
- Einer Führungsleiste mit einem Sicherheitsknopf
- Einer Kapsel-Kappe
- Einem Entlüftungsknopf


Sicherheitsmechanismus für automatisches oder manuelles Öffnen der Kappe, je nach dem Bedürfnis des Patienten

Manuelles Öffnen der Kappe



Kontrollierte Darmgasentweichung für eine aktive Entlüftung

Entlüftungsknopf

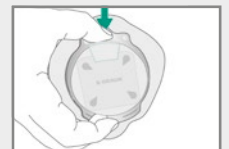


Hygienisch: Integrierter Schaum zur Unterstützung der Basisplatten-Sauberkeit

Diskretion: Geschlossener, gefalteter Kolostomie-Beutel mit integriertem Filter

Einsatz des Beutels



Führungsleiste für eine einfache und sichere Anbringung der Kapsel an die Basisplatte

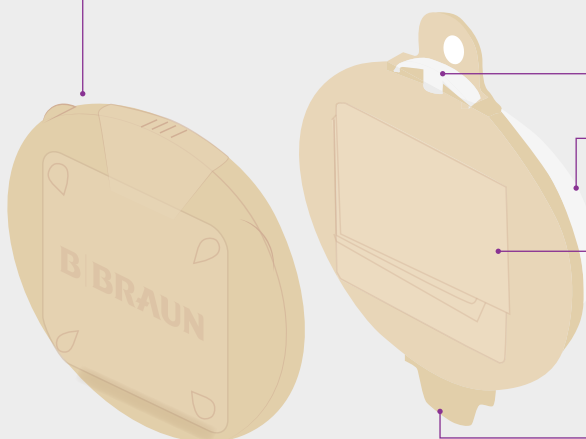

Be 1[®]: EINE KOMPAKTE LÖSUNG

KLINISCH GEPRÜFTE VORTEILE

75 % der Patienten sagen, dass sie wieder Kontrolle über die Entleerung ihres Stuhls und der Entweichung von Darmgasen haben.⁶




60 % der Patienten geben an, dass sie während des Tragens von Be 1[®] ein gutes oder sehr gutes Körperbild haben.⁶



79 % der Patienten beurteilen, dass Be 1[®] leise ist und stomabedingte Geräusche verhindert.⁶



Seitliche Ansicht der Be 1[®] Kapsel

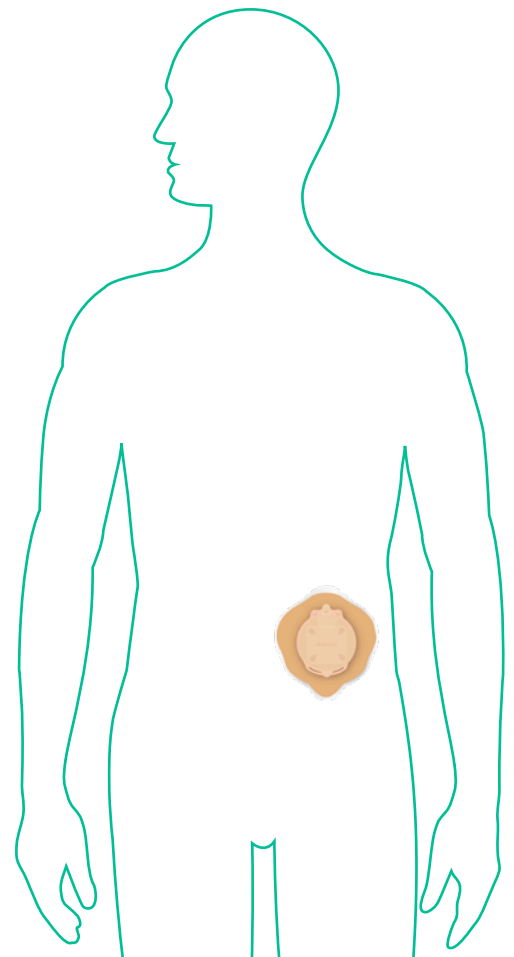

Kompakte Größe von Be 1[®] am Bauch

EIN SYSTEM FÜR DIE TÄGLICHEN BEDÜRFNISSE IHRER PATIENTEN



Am Tag kann Be 1[®] als Alternative zu bestehenden geschlossenen Beuteln genutzt werden

- Kontinuierlich
- Gelegentlich, je nach Bedarf!



Be 1[®] Kapsel – Ansicht von hinten



Für die Nacht empfehlen wir einen geschlossenen Beutel



Softima[®] 3S Kolostomie

1 Krouse, R. et al.: Quality of life outcomes in 599 cancer and non-cancer patients with colostomies, März 2007, J Surg Res., 138(1), S. 79-87

2 Sprangers, MA. et al.: Quality of life in colorectal cancer. Stoma vs non stoma patients, April 1995, Dis Colon Rectum, 38(4), S. 361-369

3 Roberts, DJ. et al.: The pursuit of colostomy continence, März 1997, J Wound Ostomy Continence Nurs., 24(2), S. 92-97

4 McKenzie, F. et al.: Psychological impact of colostomy pouch change and disposal, März 2006, Br J Nurs., 15(6) S. 308-316

5 Lynch, BM: Stoma surgery for colorectal cancer: a population-based study of patient concerns, Juli 2008, J Wound Ostomy Continence Nurs., 35(4), S. 424-428

6 Offene, interventionelle Multicenter-Pilotstudie mit 30 Kolostomiepatienten an 7 französischen Kliniken. Ref OPM-G-H-1604. Publikation in Vorbereitung

PRODUKTDETAILS



Softima® 3S Be 1® Basisplatte plan

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
55 mm	15-40 mm	29.26.05.1099	10 Stück	936516DE	15198485
55 mm	15-40 mm	29.26.05.1099	5 Stück	936517DE	15198516
65 mm	15-50 mm	29.26.05.1099	10 Stück	936616DE	15198491
65 mm	15-50 mm	29.26.05.1099	5 Stück	936617DE	15198539



Softima® 3S Basisplatte plan

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
55 mm	15-40 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936515DE	04821604
55 mm	35 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936535DE	04821610
55 mm	40 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936540DE	04822271
65 mm	15-50 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936615DE	04822354
65 mm	45 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936645DE	04822360



Be 1® Kapsel

RINGGRÖSSE	VOLUMEN	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
55 mm	~615 ml	29.26.01.0083	30 Stück	9350355DE	15198462
55 mm	~615 ml	29.26.01.0083	10 Stück	9350155DE	15198427
65 mm	~635 ml	29.26.01.0083	30 Stück	9350365DE	15198479
65 mm	~635 ml	29.26.01.0083	10 Stück	9350165DE	15198456

Be 1® ist ebenfalls kompatibel mit den Softima® 3S Basisplatten plan



Softima® 3S - Geschlossener Kolostomie-Beutel

RINGGRÖSSE	FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
55 mm	●	Mini	~220 ml	29.26.04.1088	30	931255DE	04760216
55 mm	●	Midi	~460 ml	29.26.01.0074	30	931055DE	04760133
55 mm	○	Midi	~460 ml	29.26.01.0074	30	931155DE	04757013
55 mm	●	Maxi	~600 ml	29.26.01.0074	30	931455DE	04763232
55 mm	○	Maxi	~600 ml	29.26.01.0074	30	931555DE	04760251
65 mm	●	Midi	~460 ml	29.26.01.0074	30	931065DE	04760162
65 mm	○	Midi	~460 ml	29.26.01.0074	30	931165DE	04760096
65 mm	●	Maxi	~600 ml	29.26.01.0074	30	931465DE	04763249
65 mm	○	Maxi	~600 ml	29.26.01.0074	30	931565DE	04760274

VE = Verpackungseinheit in Stück | ● beige | ○ transparent

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
 Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de/be1