


# HAUTLÄSIONEN DURCH PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG: PRÄVENTIONSMASSNAHMEN

Die Wirksamkeit und Wichtigkeit der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Mund-Nasen-Schutz, Schutzbrillen und Handschuhen - besonders in Zeiten von COVID-19 - ist bekannt und unumstritten. Leider kann das Tragen persönlicher Schutzausrüstung über einen längeren Zeitraum hinweg zu Hautläsionen führen. Diese können äußerst schmerzhaft und ein Einfallstor für Bakterien und daraus resultierende Infektionen sein. Wie also kann der Entstehung solcher Läsionen effektiv entgegengewirkt werden?

## DAS PROBLEM:

Druck, Reibung und Feuchtigkeit können zu Hautläsionen führen - besonders gefährdet sind dabei die nachfolgenden Stellen:

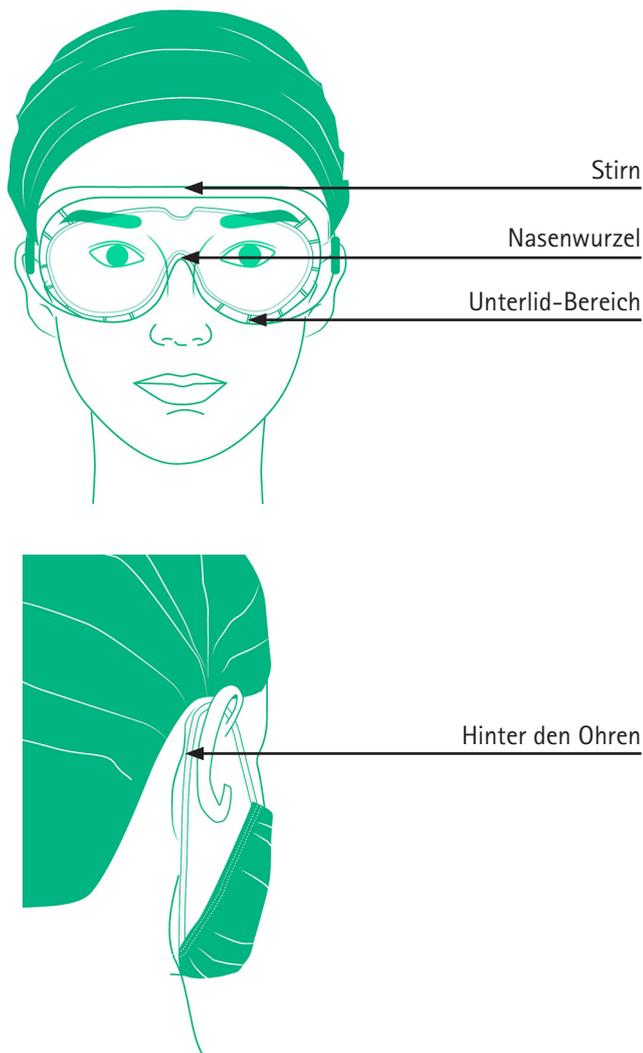


## PRÄVENTIONSMASSNAHMEN:

Die Haut muss gepflegt und geschützt und mechanische Reize von außen reduziert werden.

**Hautschutz** mit Askina® Barrier Cream. Transparenter und effektiver Schutzfilm für sensible Haut - wirkt bis zu 72 Stunden.



**Reduktion von Druck und Reibung** mit Askina® DresSil Border Lite. Schaumstoffauflagen in verschiedenen Größen - selbsthaftend durch Silikonbeschichtung.

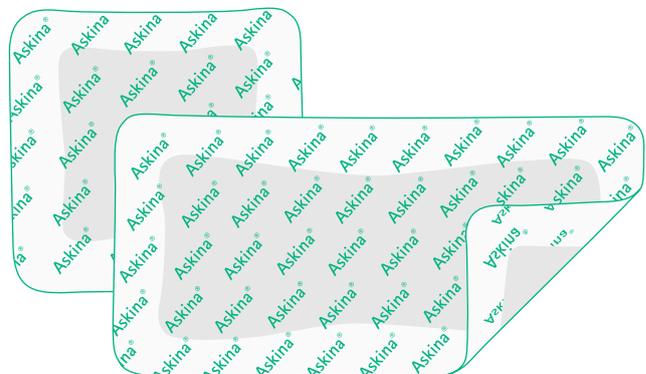


**SCHRITT 1:** Waschen Sie Ihre Hände, Ihr Gesicht und die Stellen hinten Ihren Ohren mit Wasser und Seife und trocknen Sie sich vorsichtig ab.


**SCHRITT 2:** Applizieren Sie einen Hautschutzfilm mit Askina® Barrier Cream. Kurz nachdem Sie Askina® Barrier Cream dünn auf die Haut aufgetragen haben, bildet das Produkt einen transparenten und effektiven Schutzfilm aus.

**SCHRITT 3:** Betroffene Hautstellen mit den silikonbeschichteten Schaumstoffauflagen Askina® DresSil Border Lite abdecken, um Druck und Reibung zu reduzieren. **Wichtig:** Die Schutzfolie über der Silikonschicht erst nach dem Zuschneiden ablösen.

So einfach geht's:

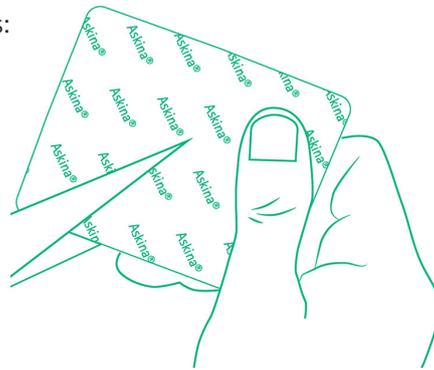

**SCHRITT 4:** Ziehen Sie die PSA so an, dass diese korrekt sitzt und sicher abschließt.

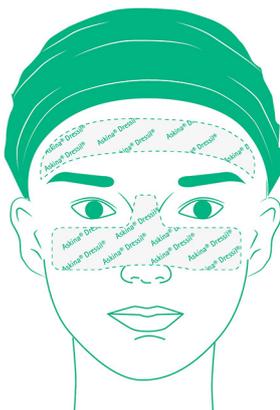

**TIPP:** Pflegen Sie irritierte Haut mit der schnell einziehenden, pH-hautneutralen Feuchtigkeitslotion Trixo®-lind.



AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG	VE	ART.-NR.	PZN
Askina® Barrier Cream	92 gr	1 Stück	4119201	10417540
Askina® DresSil Border Lite	5,5 x 12 cm	10 Stück	5385210	15268725
Askina® DresSil Border Lite	10 x 20 cm	10 Stück	5381210	15268783
Trixo®-lind	100 ml-Tube	1 Stück	18605	08504875